



# ChokeVac

## Συσκευή Διάσωσης από Πνιγμονή

### (ΛΑΒΗ-HANDLE)

Εύκολη στη χρήση από κάθε άτομο

### (ΕΜΒΟΛΟ-PLUNGER)

Παράγει αρνητική πίεση

### (ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ-VENT VALVE)

Εκκένωση αέρα από το κύριο σώμα για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να παράγει ισχυρή αναρρόφηση.

### (ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-FACE MASK)

Πολύ απαλή μάσκα προσώπου, φιλική προς το δέρμα και καμία ανησυχία για τραύμα κρανίου.

Περιλαμβάνει:

Μία Μάσκα παιδική

Μία μάσκα ενηλίκων



## Εύκολο στη χρήση σε έκτακτο περιστατικό πνιγμού



1. Τοποθετήστε



2. Πιέστε



3. Τραβήξτε

### 1. Τοποθέτηση

Τοποθετήστε τη μάσκα γύρω από τη μύτη και το στόμα του θύματος, κρατήστε τη μάσκα με το αδύναμο χέρι σας για να σφραγίσετε καλά το πρόσωπο του θύματος.

### 2. Πίεση

Πιέστε το έμβολο προς τα κάτω με το δυνατό σας χέρι, όλος ο αέρας θα διαφύγει από το σύστημα βαλβίδας μιας κατεύθυνσης και θα αποτρέψει το ξένο σώμα από το να ωθηθεί περαιτέρω μέσα στο θύμα.

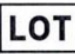

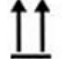
### 3. Τραβήξτε

Τραβήξτε προς τα πίσω τη λαβή κρατώντας τη μάσκα στη θέση της. Αυτό θα προκαλέσει αναρρόφηση. Εάν το ξένο σώμα δεν βγει με το πρώτο τράβηγμα, συνεχίστε να πιέζετε και να τραβάτε το έμβολο χωρίς να αφαιρέσετε τη συσκευή από το πρόσωπο του θύματος.



# ChokeVac

## Σύμβολα

	Παραγωγός		Σήμανση CE
	Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα		Μοναδική Αναγνώριση Συσκευής
	Εισαγωγέας		Κωδικός παρτίδας
	Ιατρικές Συσκευές		Ημερομηνία κατασκευής, made in China
	Προσοχή		Χρήση από
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Κρατήστε το στεγνό
	Do not reuse		Μακριά από το ηλιακό φως
	Non-sterile		Εύθραστο, χειριστείτε με προσοχή
			Διατηρείται σε όρθια θέση κατά τη μεταφορά

## Choke VAC Συσκευή πνιγμονής

Ποσότητα: 1TMX



**Xiamen Winner Medical Co., Ltd.**  
Area A, 6F, No. 588-1, TongFu Road, TongAn District, 361100 Xiamen City, Fujian Province P.R. China



**MedPath GmbH**  
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany

Imported and distributed by - Εισαγωγή και διανομή από:

**S. Konstantinidis & Co LTD – Pharmamedihelp**  
31 Afentouli str. 185 36, Piraeus – Greece  
site: [www.pharmamedihelp.gr](http://www.pharmamedihelp.gr) tel: 0030 210 451430

Βασικός Κωδικός UDI-DI: 697038572Choke VACLZ



TW8648



2023-11-15



20234616



2026-11-14

